

PASO A PASO

SISTEMA NEOMEDIC IN SI TU



PRIMERA PARTE

- Procedemos primero a encender nuestro CPU y Nuestro monitor de CPU.
- Una vez que nos da el acceso al programa, elegimos del lado Izquierdo Neomedic Endoscopia.
- Le damos doble click.
- Nos Accede a la pantalla.

Nos lanzara un mensaje de bienvenida:

- Bienvenido a **NEOMEDIC** donde nos va a pedir nombre y contraseña, debemos de seleccionar el apartado de **SECRETARIA**.
- Le damos aceptar.
- Y nos dará acceso al programa donde vamos a vaciar nuestros datos del paciente y médico.

SEGUNDA PARTE

- Seleccionamos la parte superior izquierda en el apartado **estudios**.
- Procedemos a elegir **asistente** en la parte superior izquierda de nuestro monitor, le damos doble clic.
- La plataforma nos lanzará un formulario, procederemos a llenar los espacios requeridos según lo requiera nuestro centro de trabajo.

DATOS A LLENAR:

Datos en color rojo son datos indispensables para el correcto llenado de la ficha de paciente.

- **CLASIFICACIÓN (EN ESTE APARTADO SE SUGIERE PONER EL NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA MAYOR SEGURIDAD DE CONTROL DE DATOS)**
- **NOMBRE**
- **APELLIDOS**
- **DIRECCIÓN**
- **CORREO ELECTONICO**
- **CURP**
- **TELÉFONO**
- **AFILIACIÓN**
- **FECHA DE NACIMIENTO**
- **EDAD ACTUAL**
- **LUGAR DE NACIMIENTO**

- SEXO (HOMBRE / MUJER)
- DIAGNOSTICO PRELIMINAR
- REFERIDO POR:
- DIRIGIDO A: (Nombre del médico que solicita el estudio)
- TIPO DE ESTUDIO:
- MÉDICO
- ANESTESIOLOGO
- SEDANTES (En sedantes puedes colocar los datos del sedante utilizado para el procedimiento, adicional como es una caja de texto puedes recurrir a insertar notas o información adicional que tiene que ver con el paciente y es de importancia para el médico.)

TERCERA PARTE

- Una vez que tenemos los datos del paciente y del médico, además de los del estudio, le vamos a dar siguiente en la parte inferior derecha de nuestro monitor.
- Nos pasará al apartado Vídeo.
- Nuestro endoscopio nos lanzara la imagen de video y procederemos a verlo en la pantalla.
- Una vez que comienza el médico a hacer su estudio, el va a ir tomando fotos ya sea desde el endoscopio o con el Mouse, hay un ícono en la parte izquierda del monitor, que nos indica una camarita, si le aprietan, ahí nos va a dar el clic de la foto o dentro de la foto o del video.
- Es importante recordar que desde el endoscopio y en el icono de la cámara en el sistema se pueden tomar fotos.
- **El sistema cuenta con una función para poder grabar video durante el procedimiento**
- En la parte izquierda nos va a aparecer un ícono de vídeo ahí lo único que hay que dar, si el médico lo requiere, es clic.
- Y va a empezar a grabar vídeo en la parte central del monitor les apareció un contador que nos indica el tiempo transcurrido del video.
- Una vez que termina el médico, su estudio se le da detener al video.
- Y nos va a aparecer una pantallita de confirmación donde dice que el video se ha guardado correctamente ahí nada más es aceptar y el video se guarda en la computadora.
- Una vez finalizado el procedimiento y que tengan su captura de imágenes y/ó video le damos **siguiente**.
- El sistema nos arrojará las opciones que tenemos de imágenes para llenar el reporte.
- Se puede elegir desde una hasta 12 fotos, dependiendo el formato que quiera elegir el médico.
- Una vez que eligió las fotos de la parte derecha del monitor, se nos indica la cantidad de fotos a imprimir que va a tener el reporte se le da **siguiente**.
- El sistema nos mandará al apartado de hallazgos del estudio donde el médico va a empezar a escribir su reporte, es decir, la descripción del procedimiento que hizo ,un diagnóstico y su nombre de quién lo hizo el médico que realizó el reporte una vez terminado, ese le da siguiente y nos pasa al reporte que se va a imprimir.

CUARTA PARTE

- Si no tuvo ningún problema hasta aquí.
- Le da finalizar, y puede imprimir su reporte.
- Si le faltó algo, se puede regresar en la parte inferior derecha con el botón dar atrás.
- La plataforma te da la opción de corregir, la toma de datos, el reporte y la toma de fotos si lo quiere.
- De lo contrario, le da finalizar y se guarda automáticamente dentro de nuestra CPU.

SI QUEREMOS RECURRIR AL VIDEO.

- Nos regresamos al estudio.
- Nos vamos a video.
- Desplegamos el vídeo.
- Corremos el vídeo para ver que si está grabado.
- Checamos, que es que el correspondiente y en la parte inferior izquierda.
- Le damos grabar, ya sea para grabarlo dentro de nuestra cpu, en un CD, en un DVD o en un un Blue Ray.
- Y le damos siguiente ya que tengamos nuestro disco.
- Colocado.
- Lo insertamos, le va a dar formato al programa y procedemos a grabar el DVD con el estudio.