

PASO A PASO

SISTEMA NEOMEDIC PC

PRIMERA PARTE

- Procedemos primero a encender nuestro equipo de cómputo.
- Localizaremos el icono de NEOMEDIC ENDOSCOPIA y le daremos doble clic.




- Una vez que nos da el acceso al programa, nos lanzara un mensaje de bienvenida:
- Bienvenido a NEOMEDIC donde nos va a pedir nombre y contraseña, debemos de seleccionar el apartado de SECRETARIA.




- Una vez seleccionado le damos clic en aceptar.


- El programa nos dará acceso al programa donde vamos a vaciar nuestros datos del paciente y médico.

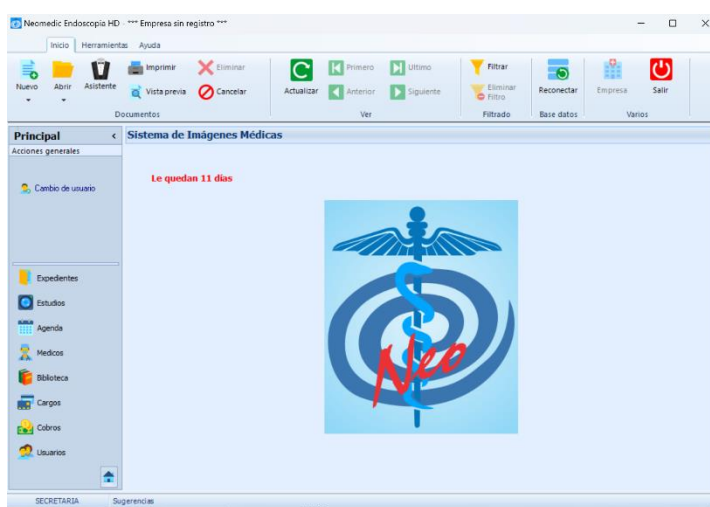

- Nos vamos a la parte izquierda del programa y elegimos estudios.

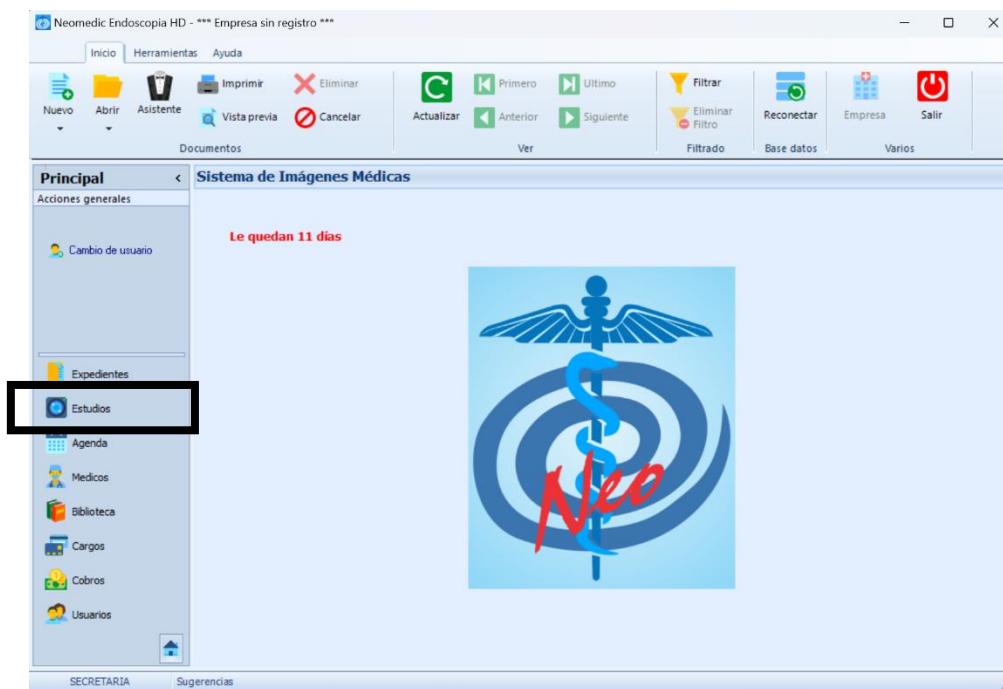

- Una vez dentro del apartado de **estudios**, seleccionaremos el botón **asistente**.

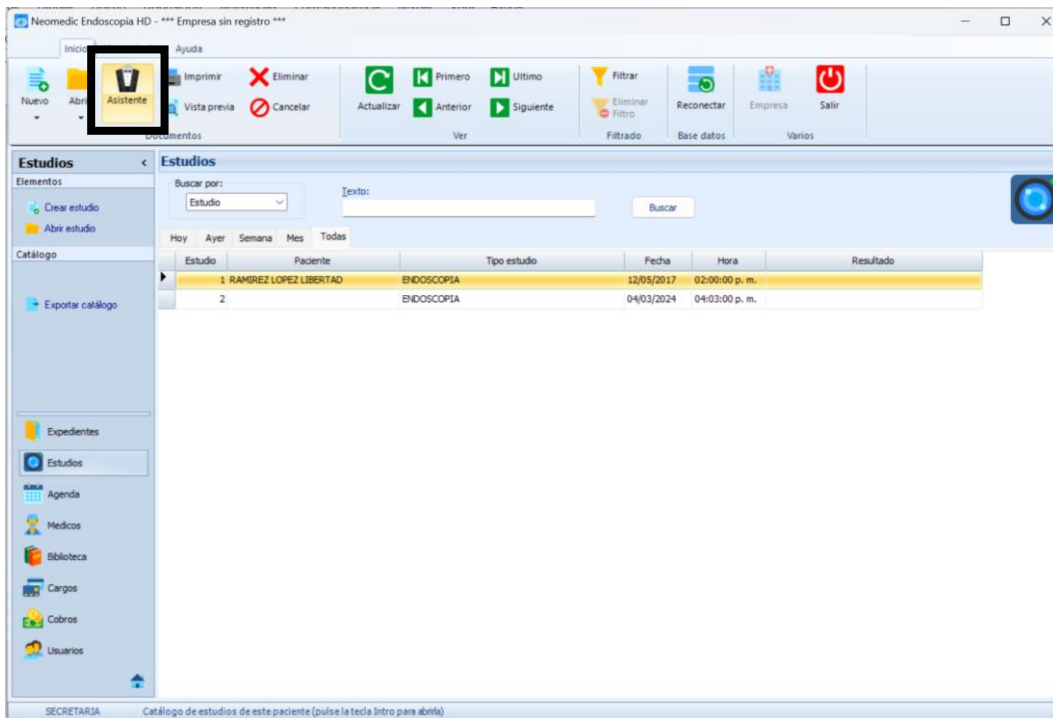

SEGUNDA PARTE

- La plataforma nos lanzará un formulario, procederemos a llenar los espacios requeridos según lo requiera nuestro centro de trabajo.

The screenshot shows the 'Paso 1: Datos del paciente y del estudio' form. It is divided into two main sections: 'Paciente' (Patient) and 'Estudio' (Study). The 'Paciente' section includes fields for 'Código' (7), 'Nombre', 'Apellidos', 'Dirección', 'Correo elect.', 'Teléfono', 'Fecha nac.', 'Sexo' (Hombre/Mujer), and 'Fotografía'. The 'Estudio' section includes fields for 'Número', 'Fecha', 'Diag. preliminar', 'Referido por', 'Dirigido a', 'Tipo estudio', 'Medico', 'Anestesia', 'Anestesiologo', and 'Sedantes'. There are also buttons for 'Antecedentes' and 'Otros'. The bottom of the form has navigation buttons: 'Atrás', 'Siguiente', and 'Cancelar'.

DATOS A LLENAR:

Datos en color rojo son datos indispensables para el correcto llenado de la ficha de paciente.

- CLASIFICACIÓN (EN ESTE APARTADO SE SUGIERE PONER EL NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA MAYOR SEGURIDAD DE CONTROL DE DATOS)
- NOMBRE
- APELLIDOS
- DIRECCIÓN
- CORREO ELECTRONICO
- CURP
- TELÉFONO
- AFILIACIÓN
- FECHA DE NACIMIENTO
- EDAD ACTUAL
- LUGAR DE NACIMIENTO
- SEXO (HOMBRE / MUJER)
- DIAGNOSTICO PRELIMINAR
- REFERIDO POR:
- DIRIGIDO A: (Nombre del médico que solicita el estudio)
- TIPO DE ESTUDIO:
- MÉDICO
- ANESTESIOLOGO
- SEDANTES (En sedantes puedes colocar los datos del sedante utilizado para el procedimiento, adicional como es una caja de texto puedes recurrir a insertar notas o información adicional que tiene que ver con el paciente y es de importancia para el médico.)

TERCERA PARTE

- Una vez que tenemos los datos del paciente y del médico, además de los del estudio, le vamos a dar siguiente en la parte inferior derecha de nuestro monitor.
- Nos pasará al apartado Vídeo.
- Nuestro endoscopio nos lanzara la imagen de video y procederemos a verlo en la pantalla.
- Una vez que comienza el médico a hacer su estudio, el va a ir tomando fotos ya sea desde el endoscopio o con el Mouse, hay un ícono en la parte izquierda del monitor, que nos indica una camarita, si le aprietan, ahí nos va a dar el clic de la foto o dentro de la foto o del video.
- Es importante recordar que desde el endoscopio y en el icono de la cámara en el sistema se pueden tomar fotos.
- **El sistema cuenta con una función para poder grabar video durante el procedimiento**
- En la parte izquierda nos va a aparecer un ícono de vídeo ahí lo único que hay que dar, si el médico lo requiere, es clic.
- Y va a empezar a grabar vídeo en la parte central del monitor les apareció un contador que nos indica el tiempo transcurrido del video.
- Una vez que termina el médico, su estudio se le da detener al video.
- Y nos va a aparecer una pantallita de confirmación donde dice que el video se ha guardado correctamente ahí nada más es aceptar y el video se guarda en la computadora.
- Una vez finalizado el procedimiento y que tengan su captura de imágenes y/o video le damos **siguiente**.
- El sistema nos arrojará las opciones que tenemos de imágenes para llenar el reporte.
- Se puede elegir desde una hasta 12 fotos, dependiendo el formato que quiera elegir el médico.
- Una vez que eligió las fotos de la parte derecha del monitor, se nos indica la cantidad de fotos a imprimir que va a tener el reporte se le da **siguiente**.
- El sistema nos mandará al apartado de hallazgos del estudio donde el médico va a empezar a escribir su reporte, es decir, la descripción del procedimiento que hizo, un diagnóstico y su nombre de quién lo hizo el médico que realizó el reporte una vez terminado, ese le da siguiente y nos pasa al reporte que se va a imprimir.

CUARTA PARTE

- Si no tuvo ningún problema hasta aquí.
- Le da finalizar, y puede imprimir su reporte.
- Si le faltó algo, se puede regresar en la parte inferior derecha con el botón dar atrás.
- La plataforma te da la opción de corregir, la toma de datos, el reporte y la toma de fotos si lo quiere.
- De lo contrario, le da finalizar y se guarda automáticamente dentro de nuestra CPU.

SI QUEREMOS RECURRIR AL VIDEO.

- Nos regresamos al estudio.
 - Nos vamos a video.
 - Desplegamos el vídeo.
 - Corremos el vídeo para ver que si está grabado.
 - Checamos, que es que el correspondiente y en la parte inferior izquierda.
 - Le damos grabar, ya sea para grabarlo dentro de nuestra cpu, en un CD, en un DVD o en un un Blue Ray.
 - Y le damos siguiente ya que tengamos nuestro disco.
 - Colocado.
 - Lo insertamos, le va a dar formato al programa y procedemos a grabar el DVD con el estudio.
-
- Una vez que tenemos los datos del paciente y del médico, además de los del estudio, le vamos a dar siguiente en la parte inferior derecha de nuestro monitor.